

オモテ

レパーサ[®]皮下注140mgペン の投与を受けられる方へ 投与方法クイックガイド


本クイックガイドを利用する前に、同梱の取扱説明書を必ずご確認ください。

お問合せ先(患者さん、ご家族の方向け)
レパーサくすり相談センター
受付時間 / 月～金 9:00～17:30(土日・祝日・会社休日を除く)
☎ 0120-803-792




07799002

各部の名称

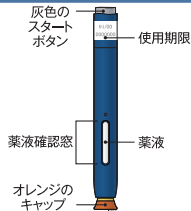

ペンの外箱を冷蔵庫から取り出し、室温で30分以上待ちます。

注射する部位を決めて消毒します。

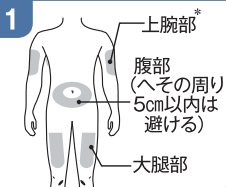

注射の準備ができれば、オレンジのキャップをまっすぐに引き抜きます。オレンジのキャップを外したら5分以内に注射してください。針内の薬液が乾き注射できないことがあります。

2



*医師等または訓練を受けた家族以外は上腕部の外側への投与はできません。

ウラへ続く

ウラ

レパサ®皮下注140mgペン
の投与を受けられる方へ
投与方法クイックガイド

レパサ®皮下注140mgペンの
使い方は以下のサイトからイラ
スト、動画でご確認できます。

URL: <https://repatha-pts.jp/>



AMGEN®  astellas

オモテからお読みください

注射する部位を引き伸
ばすか、またはつまん
で、皮膚の表面を硬くし
ます。

3

引き伸ばす
方法




or

つまむ方法



皮膚を引き伸ばしたまま、また
はつまんだまま、黄色の安全
カバーを注射部位に直角に
あて、押し込みます。

4

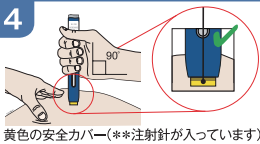

黄色の安全カバー(**注射針が入っています)

ペンが動かなくなるまでしっかり
と皮膚に押しあてたまま、スタート
ボタンを押します。


5



注射の準備ができたなら、灰色のスタートボ
タンを押します。カチッという音を確認します。

皮膚に押しあてたまま、約15秒間
待ちます。

6

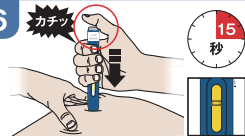

注射が終わると薬液確認窓が黄色に変わ
ります。(終了時のカチッという音は聞こえない
場合があります)