




レパーサ[®]皮下注140mgペン

廃棄袋〈6本収納可〉


⚠ 注意

- 使用済皮下注ペンは医療廃棄物として取り扱われます。
使用済皮下注ペンの廃棄方法については病院・医院の指示に従ってください。
収納済みの使用済皮下注ペンを取り出すのは危険ですのでお止めください。
不具合があり注射できなかつた場合は、廃棄袋に入れず医療機関に連絡してください。

- (注)一般家庭用ゴミなどには決して捨てないでください。
- 針が安全カバーから出た使用済皮下注ペンを入れしないでください。
 - 幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
 - 万が一、廃棄袋が破損した場合には、使用を中止し、新しいものを使用してください。
新しいものは、病院、医院にて交換してください。

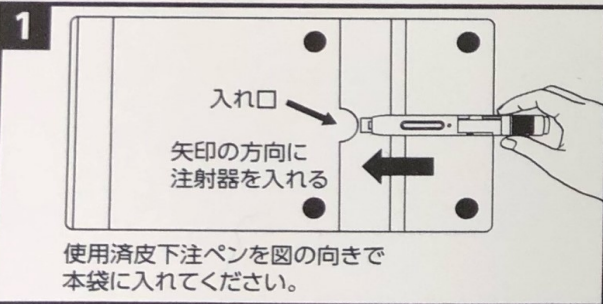

ふたを開けて、使用済皮下注ペンを丸い穴の方から入れてください。
(6本収納できます)

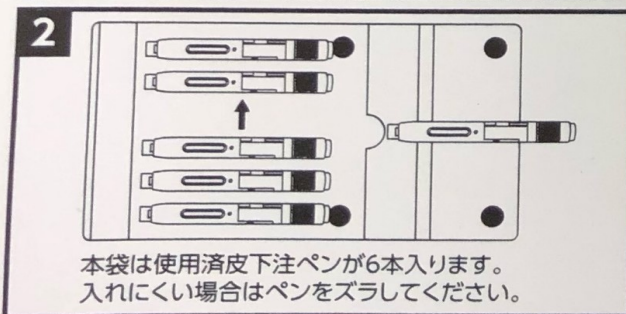

ふたを閉じてください。
マジックテープがしっかりと貼り付いているか確認してください。

※付属のプレートは、オートミニドーズ用になりますので使用できません。

レパーザ[®]皮下注420mg
オートミニドージャー

廃棄袋〈3個収納可〉



..... ⚠ 注意
.....

●使用済オートミニドージャーは医療廃棄物として
取り扱われます。

使用済オートミニドージャーの廃棄方法については
病院・医院の指示に従ってください。

収納済みの使用済オートミニドージャーを取り出す
のは危険ですとお止めください。


不具合があり注射できなかった場合は、廃棄袋に
入れず医療機関に連絡してください。

(注)一般家庭用ゴミなどには決して捨てないでください。

●幼児の手の届かないところで使用・保管して
ください。

●万が一、廃棄袋が破損した場合には、使用を中止し、
新しいものを使用してください。

新しいものは、病院、医院にて交換してください。
.....

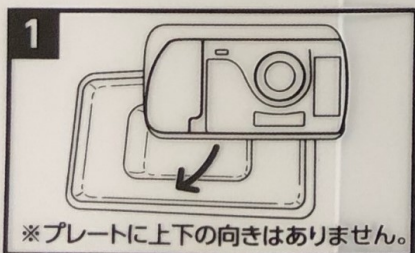

※プレートに上下の向きはありません。


付属されているくぼみのある
プレートに針に注意しながら使用済
オートミニドージャーを貼りつけて
ください。



2 奥まで入れてください。

手前に引く

ふたを開けて、使用済オートミニドージャーを横長の
穴の方から奥までしっかりと入れてください。
(3個収納できます)
帯の穴に指を通して、手前に引きながら入れると
開口部が開いて簡単に入れる事ができます。

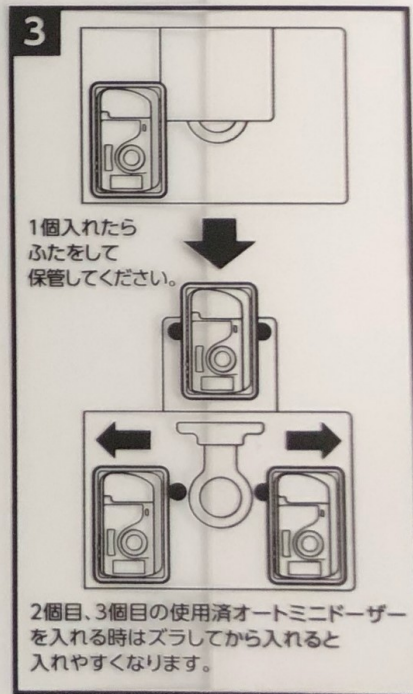

3
1個入れたら
ふたをして
保管してください。

2回目、3回目の使用済オートミニドージャー
を入れる時はズラしてから入れると
入れやすくなります。

ふたを閉じてください。
マジックテープがしっかりと貼り
付いているか確認してください。